

Fassisi Diarreesneltest Triple

Giardia | Parvo | Corona (Hond en Kat)

NL2025V1



Made in Germany 
 Save CO2

Gewicht, inhoud	Sneltest 1 stuks in brievenbusverpakking
EAN Code	4260222680657
Advies Verkoopprijs	Zie prijslijst
Doeldier	Hond en Kat
Indicatie	Sneldetectie van Giardia, Parvo en Corona de ontlasting van honden en katten.
Korte beschrijving	Fassisi Triple is een sneltest voor detectie van belangrijke veroorzakers van diarree; Giardia duodenalis, Parvo en Corona in de ontlasting van honden en katten.
Lange beschrijving	De sneltest om drie verschillende diarreepathogenen op te sporen in de ontlasting van katten en honden. Parallele screening en differentiatie van Corona virus (CCV en FCoV, Parvo virus (CPV en FPV) en Giardia duodenalis (giardia lamblia en giardia intestinalis) Giardia wordt gedetecteerd door de oppervlakte-antigenen van Giardia-cysten en trofozoïeten. De ziekteverwekker behoort tot de soort dunne darmparasieten en is een van de meest voorkomende darmparasieten ter wereld (ongeveer 10% van alle honden en katten dragen Giardia). De ziekteverwekker tast het maagdarmkanaal van het zieke dier aan en kan onopgemerkt leiden tot een ziekteverloop van een week tot enkele maanden. Giardiose is vaak latent en moeilijk te identificeren. Ook mensen kunnen besmet raken met Giardia. Parvo Het hondenparvovirus komt overeen met het kattenparvovirus in 99% van de DNA-structuur (genoom). Om deze reden kunnen deze ziekteverwekkers met één test voor beide diersoorten (hond en kat) worden opgespoord. De ziekte wordt voornamelijk verspreid via de ontlasting. Als een dier besmet is met het parvovirus en niet wordt behandeld, bijvoorbeeld omdat de ziekte niet is ontdekt, neemt de sterfte toe. Door tijdige behandeling (bijv. infusies en enterale voeding) kan de overlevingskans van het dier echter worden vergroot tot 90%. Een vroege diagnose, is dan ook belangrijk om het zieke dier met succes te behandelen. Corona De CCV (Hond) matcht de FCoV (Kat) tot 99% in de DNA-structuur. Zo kunnen deze ziekteverwekkers met één test voor beide diersoorten (hond en kat) worden opgespoord. De Fassisi Triple Sneltest kan worden gebruikt om CCV te onderscheiden van een parvovirusinfectie die vergelijkbare symptomen veroorzaakt (bijv. waterige en kwaadaardige diarree).

De symptomen veroorzaakt door FCoV zijn ook moeilijk te categoriseren. De ziekte kan dus onopvallend en in het ergste geval zelfs dodelijk zijn. De zeer besmettelijke virusziekte komt vooral veel voor in huisvesting met meerdere katten. Vooral bij onduidelijke symptomen kan de Fassisi Triple-test een zeer nuttig hulpmiddel zijn om snel de ziekteverwekker te identificeren die het probleem veroorzaakt.

De Fassisi Triple Test is vooral handig voor het opsporen van gemengde infecties of als het onduidelijk is welke oorzaak tot diarreeverschijnselen leidt,

Belangrijkste eigenschappen:

- Eenvoudig en hygiënisch in gebruik, alle benodigdheden zijn in de kit ingesloten.
- Voor detectie in ontlasting
- Testresultaat binnen 10 minuten, direct ter plaatste te gebruiken
- Bewaring bij kamertemperatuur kan bij (2-30 °C) worden bewaard.

Gevoeligheid, specificiteit en TTP (total test performance)

	Sensiviteit	Specificiteit	TTP
Parvo CPV/FCV	93,33%	99,99%	99,00%
Corona CCV/FCoV	99,99%	97,50%	97,67%
Giardia	91,89%	97,87%	95,24%

Producent Fassisi GmbH

Fassisi GmbH is een Duitse fabrikant en ontwikkelaar van veterinaire diagnostische sneltestsystemen, gevestigd in Göttingen, Duitsland. Wij vervaardigen ons brede assortiment sneltestsystemen voor kleine en grote dieren volgens gecontroleerde, internationale kwaliteitsnormen. Fassisi biedt een eenvoudige testtoepassing op locatie, en biedt testresultaten binnen enkele minuten met een betrouwbare testkwaliteit.

Het doel van alle producten is een eenvoudige, ongecompliceerde en snelle toepassing, zodat direct gerichte therapeutische maatregelen kunnen worden genomen. Gebruik als acute diagnostiek, als screeningsproduct of om de vaccinatietiter te controleren, bestrijken de belangrijkste toepassingsgebieden van onze sneltestsystemen.

- Testcassette met 3 teststrips
- Pipet voor bemonstering
- Flacon met reagens

Zie bijsluiter

Bewaring bij kamertemperatuur (2-30°C), droog en niet in de zon bewaren, buiten bereik van kinderen.

Alvorens te gebruiken, de handleiding lezen.

Giardia, Parvo, Corona, Diarree hond en kat