



Made in Germany 
Save CO2 

Gewicht, inhoud	Sneltest Parvo 5 kits						
EAN Code	4260222680633						
Advies Verkoopprijs	Zie prijslijst						
Doeldier	Hond en Kat						
Indicatie	In-house sneldetectie van Parvo-antigenen in ontlastingsmonsters van honden en katten						
Korte beschrijving	Sneltest van Parvo-antigenen in ontlastingsmonsters van honden en katten						
Lange beschrijving	De Fassisi Parvo sneltest wordt gebruikt voor de betrouwbare antigeendetectie van parvovirussen in de uitwerpselen van honden en katten. Aangezien 99% van de DNA-structuur van het Canine Parvovirus overeenkomt met die van het Feline Parvovirus, kunnen de pathogenen voor beide diersoorten (hond en kat) met één detectie worden opgespoord. De ziekte die door parvovirussen wordt veroorzaakt, <i>Parvovirose</i>, wordt hoofdzakelijk verspreid via de uitwerpselen. Als een dier parvovirose heeft en niet wordt behandeld, bijvoorbeeld omdat de ziekte niet is opgespoord, is er een verhoogde sterftetekans (zeker onder pups). Met een tijdige behandeling) wordt de overlevingskans van het dier tot wel 90% worden verhoogd. Een vroegtijdige diagnose, is dan ook belangrijk om het zieke dier goed te kunnen behandelen. Ook voor de bescherming van andere dieren is het van essentieel belang dat parvovirose snel wordt opgespoord. Het parvovirus kan lange tijd overleven zonder gastheer en is bestand tegen wisselende milieu-invloeden. Als het parvovirus zich eenmaal onopgemerkt heeft verspreid, vormt het virus een groot besmettingsrisico voor andere dieren. Door een snelle opsporing van de ziekteverwekker biedt de test de mogelijkheid om deze problemen in een vroeg stadium tegen te gaan. Belangrijkste eigenschappen: Testresultaat binnen 10 minuten, direct ter plaatste te gebruiken • Met latextechnologie voor gemakkelijk leesbare testresultaten • De laagste concentraties ziekteverwekkers worden betrouwbaar en duidelijk gedetecteerd (CPV en FPV) • Hygiënisch gebruik • Opslag bij kamertemperatuur • Parvo test: <table><tr><td>Sensitiviteit</td><td>Specificiteit</td><td>TTP (total Test Performance)</td></tr><tr><td>93,33%</td><td>99,99%</td><td>99,00%</td></tr></table>	Sensitiviteit	Specificiteit	TTP (total Test Performance)	93,33%	99,99%	99,00%
Sensitiviteit	Specificiteit	TTP (total Test Performance)					
93,33%	99,99%	99,00%					

	Wat is Parvo? Parvo is een zeer besmettelijk virus dat diarree (soms bloederig), braken, sloomheid, spierzwakte en koorts kan geven. Het risico op een besmetting met het parvovirus is het grootst voor pups op een leeftijd tussen de 6 tot 12 weken. Het risico op sterfte is dan zeer hoog (tot 50%). Bij volwassen dieren verloopt de infectie vaak minder zichtbaar. De diarree kan variëren van mild tot ernstig, maar kan ook het dier fataal worden. Omdat het parvovirus tevens de witte bloedcellen aanvalt, daalt de weerstand van de patiënt en wordt het dier tevens vatbaar voor andere virussen en bacteriën. Het virus is met de Fassisi Parvo sneltest eenvoudig en snel aan te tonen in de ontlasting van zieke dieren. Deze gevalideerde sneltest is uiterst betrouwbaar en kan zelfstandig in de huisomgeving onder hygiënische omstandigheden worden uitgevoerd. Omdat het virus zeer hardnekkig is, is het belangrijk om deze test uit te voeren bij dieren met klachten die kunnen passen bij Parvo, zodat bij een positieve uitslag er zo spoedig mogelijk gestart kan worden met een behandeling. Bij een positief testresultaat is het dan ook van groot belang dat u zo spoedig als mogelijk met het dier én de uitgevoerde test naar uw dierenarts gaat. Producent Fassisi GmbH Fassisi GmbH is een Duitse fabrikant en ontwikkelaar van veterinaire diagnostische sneltestsystemen, gevestigd in Göttingen, Duitsland. Wij vervaardigen ons brede assortiment sneltestsystemen voor kleine en grote dieren volgens gecontroleerde, internationale kwaliteitsnormen. Fassisi biedt een eenvoudige testtoepassing op locatie, en biedt testresultaten binnen enkele minuten met een betrouwbare testkwaliteit. Het doel van alle producten is een eenvoudige, ongecompliceerde en snelle toepassing, zodat direct gerichte therapeutische maatregelen kunnen worden genomen. Gebruik als acute diagnostiek, als screeningsproduct of om de vaccinatietiter te controleren, bestrijken de belangrijkste toepassingsgebieden van onze sneltestsystemen.
Samenstelling	- Testcassette - Sample container voor verzamelen en of combineren van feces samples - Swab voor bemonstering - Flacon met reagens
Gebruik / Dosering	Zie bijsluiter
Bewaren	Bewaring bij kamertemperatuur (15-30°C), droog en niet in de zon bewaren, buiten bereik van kinderen.
Waarschuwing	Alvorens te gebruiken, de handleiding lezen.
Key Words	Parvo, Parvo sneltest, diarree hond, diarree pup, diarreetest
Up-sell	Fassisi Triple (Parvo+Corona+Giardia) Sneltest
Cross-sell	Fassisi Giardia test