


Spuit met opvulgel voor anaalklieren

Het verwijderen van de anaalklieren kan een chirurgische uitdaging zijn omwille van de ingeklapte aard van een lege anaalklier, het risico op een slecht functionerende sluitspier en het ontbreken van waarneembare anatomische oriëntatiepunten in een vasculair chirurgisch gebied.


Deze spuit bevat een veilig en niet giftige polymere gel die in de anaalklier wordt geïnjecteerd als een zachte gel. Deze gel hardt dan uit na 2 tot 4 minuten. Dit resulteert dan in een gemakkelijk waarneembare massa die vrij makkelijk kan worden verwijderd. Hierdoor wordt de operatietijd sterk verminderd en het verlaagt het risico op het achterblijven van restanten van de anaalklier.

De spuit is 18 cm lang waardoor ze ook makkelijk met kleine handen te bedienen is. Vooraan is ze voorzien van een gebogen, plastic, stompe 18G kop die 360° gedraaid kan worden. Ze is voorzien van een veiligheidsslot dat met een simpele draai los geklikt kan worden. De inhoud van de beide kamers kan dan in de mengtip geduwd worden waardoor de componenten vermengd worden en de uiteindelijke gel ontstaat.

De inhoud van 2,4 cc volstaat voor de grotere patiënten.

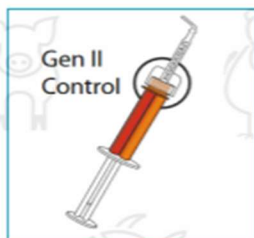


Voor gebruik moet de doorgang geopend worden van het 2-componenten-compartiment naar de mengtip.

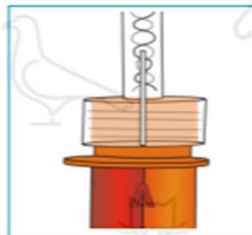

De mengtip staat op een kleine afstand van de spuit met de langste vleugel naar de open pijl gericht.



Draai de mengtip met de klok mee tot de mengtip volledig op de spuit geschroefd is.

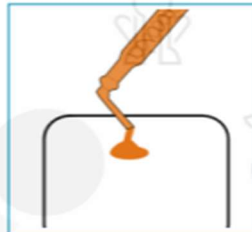

Vul dan de volledige mengtip en kijk of de gel ook vlot uit de spuitmond komt alvorens de anaalklier op te spuiten.

Let op: eens de gel gemengd is, hardt hij binnen 2 tot 4 minuten volledig uit.

