

# Fassisi Diarreesneltest Triple Giardia | Parvo | Corona (Hond en Kat)

2026V1



Made in Germany   
Save CO2 

<b>Gewicht, inhoud</b>	Sneltest 1 stuks	5 stuks	10 stuks
<b>EAN Code</b>	4260222680657	8718403362190	8718403362206
<b>Advies Verkoopprijs</b>	Zie prijslijst		
<b>Doeldier</b>	Hond en Kat		
<b>Indicatie</b>	Sneldetectie van Giardia, Parvo en Corona de ontlasting van honden en katten.		
<b>Korte beschrijving</b>	Fassisi Triple is een sneltest voor detectie van belangrijke veroorzakers van diarree; Giardia duodenalis, Parvo en Corona in de ontlasting van honden en katten.		
<b>Lange beschrijving</b>	<p>De sneltest om drie verschillende diarreepathogenen op te sporen <b>in de ontlasting</b> van katten en honden. Parallele screening en differentiatie van Corona virus (CCV en FCoV, Parvo virus (CPV en FPV) en Giardia duodenalis (giardia lamblia en giardia intestinalis)</p> <p><b>Giardia</b> wordt gedetecteerd door de oppervlakte-antigenen van Giardia-cysten en trofozoïeten. De ziekteverwekker behoort tot de soort dunne darmparasieten en is een van de meest voorkomende darmparasieten ter wereld (ongeveer 10% van alle honden en katten dragen Giardia). De ziekteverwekker tast het maagdarmkanaal van het zieke dier aan en kan onopgemerkt leiden tot een ziekteverloop van een week tot enkele maanden. Giardiose is vaak latent en moeilijk te identificeren. Ook mensen kunnen besmet raken met Giardia.</p> <p><b>Parvo</b> Het hondenparvovirus komt overeen met het kattenparvovirus in 99% van de DNA-structuur (genoom). Om deze reden kunnen deze ziekteverwekkers met één test voor beide diersoorten (hond en kat) worden opgespoord.</p> <p>De ziekte wordt voornamelijk verspreid via de ontlasting. Als een dier besmet is met het parvovirus en niet wordt behandeld, bijvoorbeeld omdat de ziekte niet is ontdekt, neemt de sterfte toe. Door tijdige behandeling (bijv. infusies en enterale voeding) kan de overlevingskans van het dier echter worden vergroot tot 90%. Een vroege diagnose, is dan ook belangrijk om het zieke dier met succes te behandelen.</p> <p><b>Corona</b> De CCV (Hond) matcht de FCoV (Kat) tot 99% in de DNA-structuur. Zo kunnen deze ziekteverwekkers met één test voor beide diersoorten (hond en kat) worden opgespoord. De Fassisi Triple Sneltest kan worden gebruikt om CCV te onderscheiden van een parvovirusinfectie die vergelijkbare symptomen veroorzaakt (bijv. waterige en kwaadaardige diarree).</p>		

De symptomen veroorzaakt door FCoV zijn ook moeilijk te categoriseren. De ziekte kan dus onopvallend en in het ergste geval zelfs dodelijk zijn. De zeer besmettelijke virusziekte komt vooral veel voor in huisvesting met meerdere katten. Vooral bij onduidelijke symptomen kan de Fassis Triple-test een zeer nuttig hulpmiddel zijn om snel de ziekteverwekker te identificeren die het probleem veroorzaakt.

De Fassis Triple Test is vooral handig voor het opsporen van gemengde infecties of als het onduidelijk is welke oorzaak tot diarreeverschijnselen leidt,

**Belangrijkste eigenschappen:**

- Eenvoudig en hygiënisch in gebruik, alle benodigdheden zijn in de kit ingesloten.
- Voor detectie in ontlasting
- Testresultaat binnen 10 minuten, direct ter plaatste te gebruiken
- Bewaring bij kamertemperatuur kan bij (2-30 °C) worden bewaard.

	<b>Gevoeligheid</b>	<b>Specificiteit</b>	<b>TTP</b>
			Total Test performance
<b>Parvo</b> CPV/FCV	93,33%	99,99%	99,00%
<b>Corona</b> CCV/FCoV	99,99%	97,50%	97,67%
<b>Giardia</b>	91,89%	97,87%	95,24%

**Producent Fassis GmbH**

Fassis GmbH is een Duitse fabrikant en ontwikkelaar van veterinaire diagnostische sneltestsystemen, gevestigd in Göttingen, Duitsland. Wij vervaardigen ons brede assortiment sneltestsystemen voor kleine en grote dieren volgens gecontroleerde, internationale kwaliteitsnormen. Fassis biedt een eenvoudige testtoepassing op locatie, en biedt testresultaten binnen enkele minuten met een betrouwbare testkwaliteit.

Het doel van alle producten is een eenvoudige, ongecompliceerde en snelle toepassing, zodat direct gerichte therapeutische maatregelen kunnen worden genomen. Gebruik als acute diagnostiek, als screeningsproduct of om de vaccinatietiter te controleren, bestrijken de belangrijkste toepassingsgebieden van onze sneltestsystemen.

<b>Samenstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Testcassette met 3 teststrips</li> <li>- Pipet voor bemonstering</li> <li>- Flacon met reagens</li> </ul>
<b>Gebruik / Dosering</b>	Zie bijsluiter
<b>Bewaren</b>	Bewaring bij kamertemperatuur (2-30°C), droog en niet in de zon bewaren, buiten bereik van kinderen.
<b>Waarschuwing</b>	Alvorens te gebruiken, de handleiding lezen.
<b>Key Words</b>	Giardia, Parvo, Corona, Diarree hond en kat
<b>Up-sell</b>	
<b>Cross-sell</b>	