

STAP 1

VOORBEREIDING:



Voor optimale resultaten: breng de testkit en de kam in 2 uur tijd op kamertemperatuur.

Versnel dit proces door een platewarmer te gebruiken.

20°C - 25°C

STAP 3

PROCEDURE:

	RIJ	WACHTTIJD (MIN)
MONSTER	A	5'
SPOEL	B	2'
CONJUGAAT	C	5'
SPOEL	D	2'
SPOEL	E	2'
CHROMOGEN	F	5'
SPOEL	TERUG NAAR E	2'
DROGEN		5'

STAP 2

MONSTER:

1 pipetpunt is 5 µl, 2 pipetpunten is 10 µl.

Leeg de pipet goed in vakje A door de pipet een aantal keer leeg te drukken in het vakje.



Serum of Plasma

5µl



Volbloed

10µl




LET OP!

- Hou voor betrouwbare resultaten de tijdsintervallen aan.
- Het mengen is cruciaal voor geldige resultaten.
- Beweeg de kam 3-4 keer op en neer (herhaal 2-3 keer in elke rij).
- Dep de tanden van de kam op een stuk keukenpapier om overtollige vloeistoffen te verwijderen voordat je naar de volgende rij gaat.
- Lees de resultaten af wanneer de kam volledig opgedroogd is.

STAP 4

INTERPRETEER DE RESULTATEN:

SCORE	RESULTAAT	IMMUNITEITSSTATUS	AANBEVELING > 1 JAAR LEEFTIJD
S0 - S1	Negatief	Lage immuniteit	Vaccineren
S2	Zwak positief	Voldoende immuniteit*	Niet vaccineren **
S3 - S4	Positief	Goede immuniteit	Niet vaccineren
S5 - S6	Hoog positief	Uitstekende immuniteit	Niet vaccineren

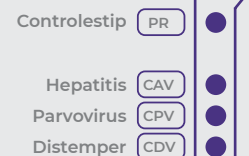

Bij een score van S2 en hoger zal de hond geen voordeel behalen uit een vaccinatie.

* Volgens de 2016 WSAVA richtlijnen.

** Het vaker vaccineren van dieren in een poging om antilichamen te verhogen is een zinloze exercitie. Het is onmogelijk om grotere immuniteit te creëren door te proberen antilichamentiter te verhogen.

Check onze website voor meer info: <https://www.vaccicheck.nl/de-belangrijke-betekenis-van-s2>



Site
NML Health

GEBRUIK VAN DE VACCICHECK:

STAP 1

Voor optimale resultaten: breng de testkit en de kam op kamertemperatuur.

(2 uur voor gebruik uit de koelkast)

Versnel dit proces door een platewarmer te gebruiken.

STAP 2

Gebruik een bloedmonster: Serum of Plasma 5µl, Volbloed 10µl.

STAP 3

Doe het bloedmonster in vakje A.

1 pipetpunt is 5 µl, 2 pipetpunten zijn 10µl.

Leeg de pipet goed in vakje A door de pipet een aantal keer leeg te drukken in het vakje.

AFLEZEN VIA COMB SCALE:

STAP 1

Lees de controlestip kleur af via kleurenbalkje.

STAP 2

Schuif C3+ naar deze kleur. Dit is je uitgangspunt. Beweeg de gele strip nu niet meer.

STAP 4

Knip het benodigde aantal tanden van de testkam en plaats deze in vakje A.

STAP 5

Doorloop de procedure volgens het schema.

De totale duur totdat je de uitslag ziet is 23 minuten.

STAP 6

Interpreteer de resultaten na 5 minuten droogtijd.

Lees af via de Comb Scale (of gebruik de te bestellen CombCam).

STAP 7

Plak de sticker met de uitslag en de gebruikte testand in het vaccinatieboekje.

STAP 8

Plaats de testkit en de testkam na gebruik weer in de koeling.

STAP 3

Vergelijk 1 voor 1 de andere stippen, en geef de waarde die er boven staat.



AFLEZEN VIA COMBCAM:

STAP 1

Plaats de batterijen. Houd de CombCam altijd met het beeldschermje naar boven.

STAP 2

Wees er zeker van dat je de juiste RFID kaart hebt.

STAP 3

Knip de juiste tand los van de kam.

STAP 4

Zet de CombCam aan door kort op het zwarte knopje te drukken.

Er verschijnt "on" op het scherm.

STAP 5

Druk nogmaals op het knopje. Er staat nu RFID.

STAP 6

Plaats de juiste RFID kaart boven op de CombCam en wacht op de piep.

Er verschijnt test op het scherm.

STAP 7

Plaats het stripje in de CombCam.

STAP 8

Druk kort op het zwarte knopje.

Het beeldscherm laat run zien en geeft kort daarna een uitslag.



Youtube Tutorial
CombCam

VacciCheck inzetten bij puppy's of katten?

Op onze website www.vaccicheck.nl lees je alle informatie die nodig is voor een succesvolle test. Voor vragen zijn wij bereikbaar via 0294455888 of per mail: info@vaccicheck.nl